

## Matériel DEA au SRI Verviers



Cpl. Philippe Decloux – 30/01/2009

## Objectifs

- Décrire les 2 DEA du service
- Différencier les 2 types d'électrodes
- Connaître les commandes et éléments d'affichage du « Fred Easy »
- Connaître les caractéristiques principales du « Fred Easy »

Cpl. Philippe Decloux – 30/01/2009

## Les Défibrillateurs externes automatisés du service

FRED (l'ancien)  
Ambulances « AMU »



**FRED Easy** (le nouveau)  
Ambulance « Feu »



Cpl. Philippe Decloux - 30/01/2009

## Les électrodes de défibrillation

**ATTENTION : électrodes différentes**

FRED (l'ancien)  
Ambulances « AMU »



**Pastille jaune → sacoché jaune**


FRED Easy (le nouveau)  
Ambulance « Feu »



**Pastille bleue → sacoché bleu**

Cpl. Philippe Decloux - 30/01/2009

## Commandes et éléments d'affichage du « FRED Easy »

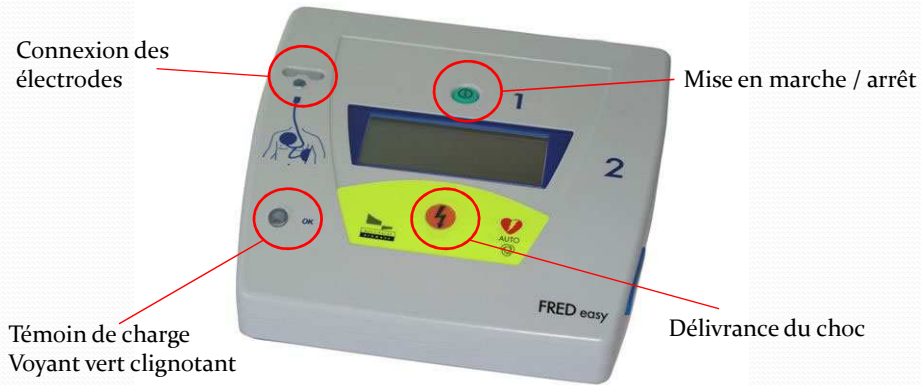

**Suivre les instructions vocales de l'appareil**

**Fonctionnement identique aux DEA de l'EPAMU**

Cpl. Philippe Decloux - 30/01/2009

## Caractéristiques principales du « FRED Easy »

- Batterie lithium NON rechargeable
- Autonomie de 5 ans maximum
- Test automatique hebdomadaire
- Si appareil défectueux :
  - Émet un signal sonore d'alarme
  - Voyant vert ne clignote pas

Cpl. Philippe Decloux - 30/01/2009

## Questions ?



Cpl. Philippe Decloux - 30/01/2009

## Conclusion

- Nouveau DEA (FRED Easy) sur l'ambulance FEU
- Electrodes pastille **jaune** → DEA sacoche **jaune**
- Electrodes pastille **bleue** → DEA sacoche **bleu**
- Ne pas tester l'appareil à l'inventaire → autotest hebdomadaire
- Fred Easy = DEA de l'EPAMU

Cpl. Philippe Decloux - 30/01/2009